

BioSimil

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

PORTATIL



VCARE 1000 - 300S

LA EVOLUCIÓN EN TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA



► ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

INDICACIONES

El Sistema **VCARE 1000-300S** para **terapia de Presión Negativa** es una bomba portátil, alimentada por batería, diseñada para generar presión negativa o succión para extraer exudados, material infeccioso y restos de tejidos del lecho de la herida a fin de favorecer el proceso de cicatrización.

- Heridas de espesor total.
- Heridas crónicas que **NO** cicatrizan pese a recibir un correcto tratamiento.
- Úlceras Venosas
- Úlceras por pie Diabético
- Úlceras Neuropáticas
- Úlceras por decúbito
- Heridas agudas tales como heridas quirúrgicas dehiscentes, heridas traumáticas y otras úlceras abiertas que podrían mejorar al ser tratadas con TPN.

INFORMACIÓN OPERATIVA

- **PESO:** (dispositivo + recipiente vacío) 320 g. aprox.
- **MOVILIDAD:** PORTÁTIL – Estuche de transporte Opcional.
- **RECIPIENTE:** Volúmen 140 ml. / 400ml. / 600 ml.
- **MODOS DE TERAPIA:** Presión continua / Presión intermitente.
- **OPCIONES DE PRESIÓN:** -20 mmHg a -200 mmHg.
- **TIEMPO DE CARGA:** 5 hs. para carga completa.
- **DURACIÓN DE LA BATERÍA:** 72 hs., según configuración.

PASOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN



- 1 Recorte la espuma de acuerdo al tamaño de la herida.
- 2 Recorte la película transparente para cubrir la espuma o gasa, más 3.5 cm. de piel intacta, garantiza que la piel perilesional esté limpia y seca.
- 3 Haga dos pequeños orificios en la película y adhiera el sistema de drenaje y parche flosure.
- 4 Conecte el drenaje a la tubería y ésta al canister de recolección.

ELIJA LA MODALIDAD DE LA TERAPIA Y EL NIVEL DE PRESIÓN.



Buenos Aires

Av. Sta. Fé 3778 / Piso 3 / of. 304
CABA (C1425BGZ)
Central Tel. (54-11) 5.032.2974 / 4.897.2098
comercial@biosimil.com.ar